

8.2 Avertissements et problèmes

Indicateurs visuels — affichage et état	Causes possibles	Mesures correctives et commentaires
 Le voyant indicateur jaune ! clignote.	Le traitement par pression négative n'a pas commencé en raison d'une fuite d'air dans le système. ✓	La pompe s'éteindra après 10 secondes si la pression négative cible n'a pas commencé à s'exercer. Vérifier les raccords pansement-tube-pompe. Vérifier la présence de fuites d'air et lisser tout pli sur la bordure de l'adhésif du pansement. Noter que l'entortillement d'un tube n'entraîne pas le clignotement du voyant indicateur jaune ! Appuyer sur le bouton bleu pendant trois (3) secondes pour commencer le traitement; le voyant indicateur vert ✓ clignotera lorsque la pression s'appliquera. Si la fuite d'air persiste, le voyant indicateur jaune ! clignotera et la pompe s'éteindra de nouveau. Continuer de vérifier la présence de plis sur le pansement et de fuites dans les raccords, et appuyer sur le bouton bleu pendant trois (3) secondes. Si le traitement ne s'applique pas, le patient ou le soignant doit communiquer avec le professionnel des soins de santé.
 Le voyant indicateur vert ✓ clignote et le voyant indicateur jaune clignote.	La pompe signale qu'elle fonctionne correctement. Les piles sont faibles.	Changer toutes les piles d'ici 24 heures. Appuyer sur le bouton bleu pendant trois (3) secondes pour éteindre la pompe. Ouvrir le compartiment à piles situé à l'arrière du système, retirer et remplacer les trois piles AAA, puis refermer le compartiment. Appuyer sur le bouton bleu pendant trois (3) secondes pour que le traitement reprenne.
 Le voyant indicateur jaune ! clignote Le voyant indicateur jaune clignote.	Fuite d'air dans le système Les piles sont faibles.	Éliminer la fuite d'air (voir ci-dessus). Changer toutes les piles d'ici 24 heures (voir ci-dessus).
 Le voyant indicateur jaune ! clignote	La durée de vie de la pompe est terminée.	La pompe a une durée de vie maximale de 30 jours; après, la pompe ne fonctionnera plus et le traitement cessera. Appuyer sur le bouton bleu pendant trois (3) secondes entraînera le clignotement des deux voyants jaunes indicateurs, en alternance mais la pompe ne sera pas fonctionnelle.

9. SPÉCIFICATIONS DE LA POMPE DE TPPN AVELLE^{MC} (MODÈLE CR4395)

Spécifications de la pompe	
Dimensions (maximales)	72mm x 78mm x 25mm / 3 in. x 3 in. x 1 in.
Poids (excluant les piles)	78g
Durée de vie (de la pompe) après l'insertion des piles	30 jours
Tension d'alimentation	4,5V DC/Pile (1,5V DC/Pile)
Type de piles/Quantité	3x piles AAA au lithium Philips™ Lithium Ultra FR03
Mode de fonctionnement	Continu
Aspiration nominale	80 mmHg
Aspiration maximale	140 mmHg
Classification de l'équipement	Alimentation interne
Niveau de protection contre les chocs électriques	Type BF – Parties comprennent le pansement de TPPN Avelle ^{MC}
Protection d'entrée	IP22
Stérilité	Non stérile
Entreposage	-25 to +70°C (-13 - 158°F), 90% RH d'humidité relative 700 à 1060 mbar de pression atmosphérique
Environnement opérationnel	5-40°C (41 - 104°F), 15-90% RH d'humidité relative 700 à 1060 mbar de pression atmosphérique
Conformité aux normes électriques	21 CFR 807, sous-partie E. Classe II
	IEC 60601-1:2005+AMD1:2012, BS EN 60601-1:2006+A12:2014, ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R)2012, CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14
	IEC 60601-1-2:2014
	IEC 60601-1-11:2015
Identifiant des systèmes médicaux électroniques programmables	SNPC1
Matériaux de construction (en contact avec le patient)	Pompe (parties soudées) — polycarbonate/ABS Sonde — PVC (sans PDEH)

10. INTERFÉRENCE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Ce dispositif a subi des tests et il est conforme aux limites imposées aux dispositifs médicaux conformément à IEC 60601-1 — 2:2014 (4e éd.). Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable et la sécurité des dispositifs médicaux contre l'interférence d'autres appareils et dispositifs électriques. L'énergie de la radiofréquence risque de perturber le fonctionnement de cet appareil. Si

celui-ci n'est pas installé et utilisé conformément au mode d'emploi, il peut causer de l'interférence à d'autres appareils à proximité. Il n'y a aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférence dans le cas d'une installation particulière. Pour obtenir plus d'informations ou des conseils sur l'immunité et les émissions électromagnétiques, communiquer avec ConvaTec ou visiter notre site au www.convatec.ca.

Le système de traitement des plaies par pression négative (TPPN) Avelle^{MC} est conforme aux exigences de performance essentielle de la norme IEC 60601-1:2005+AMD1:2012 Clause 4.3. Pour atteindre l'objectif du traitement, la performance essentielle du système de TPPN Avelle^{MC} est de maintenir une pression négative nominale de 80 mmHg.

Si le système de traitement des plaies par pression négative Avelle^{MC} est endommagé, veuillez communiquer le plus rapidement possible avec votre professionnel des soins de santé.

Directives et déclaration du fabricant — Émissions électromagnétiques		
Le système de TPPN Avelle ^{MC} est destiné à une utilisation dans l'environnement électromagnétique défini ci-dessous. Il incombe au client ou à l'utilisateur du système de TPPN Avelle ^{MC} de s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.		
Test des émissions	Conformité	Environnement électromagnétique — Indications
Émissions RF CISPR 11	Groupe 1	Le système de TPPN Avelle ^{MC} n'utilise l'énergie RF que pour son fonctionnement interne. Par conséquent, ses émissions RF sont très faibles et ne sont pas susceptibles de provoquer des interférences avec des appareils électroniques à proximité.
Émissions RF CISPR 11	Classe B	Les caractéristiques des émissions RF du système de TPPN Avelle ^{MC} font en sorte que celui-ci convient à une utilisation dans les hôpitaux, les transports et à domicile.
Émissions harmoniques IEC 61000-3-2	Sans objet	
Fluctuations de tension ou papillotement IEC 61000-3-3	Sans objet	

Directives et déclaration du fabricant — Immunité électromagnétique			
Le système de TPPN Avelle ^{MC} est destiné à une utilisation dans l'environnement électromagnétique défini ci-dessous. Il incombe au client ou à l'utilisateur du système de TPPN Avelle ^{MC} de s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.			
Test d'IMMUNITÉ	Niveau de test IEC 60601	Niveau de Conformité	Environnement électromagnétique — Indications
Décharge électrostatique (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV contact ± 15 kV air	± 8 kV contact ± 15 kV air	Les sols doivent être en bois, en béton ou en carreaux de céramique. Lorsque le sol est recouvert de matériaux synthétiques, l'humidité relative doit être d'au moins 30 %.
Coupure/Sursaut électrique rapide IEC 61000-4-4	± 2 kV pour lignes d'alimentation ± 1 kV pour lignes entrée/sortie	Sans objet	Sans objet
Surtension IEC 61000-4-5	±1 kV ligne à ligne ±2 kV ligne à ligne	Sans objet	Sans objet
Baisses de tension, brèves interruptions et variations de tension sur les lignes d'entrée d'alimentation IEC 61000-4-11	< 5 % U_T (Baisse de U_T > 95 %) pour 0,5 cycle 40 % U_T (Baisse de U_T de 60 %) pour 5 cycles 70 % U_T (Baisse de U_T de 30 %) pour 25 cycles < 5 % U_T (Baisse de U_T > 95 %) pour 5 cycles	Sans objet	Sans objet
Fréquence d'alimentation (50/60 Hz) Champ magnétique IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Les champs magnétiques à haute fréquence doivent être à des niveaux caractéristiques d'un emplacement type dans un environnement commercial ou hospitalier type.
Remarque : U_T est la tension de secteur c.a. avant l'application du niveau de test.			

Directives et déclaration du fabricant — Immunité électromagnétique			
Le système de TPPN Avelle ^{MC} est destiné à une utilisation dans l'environnement électromagnétique défini ci-dessous. Il incombe au client ou à l'utilisateur du système de TPPN Avelle ^{MC} de s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.			
Test d'IMMUNITÉ	Niveau de test IEC 60601	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique — Indications
RF conduites IEC 61000-4-6	10 Vrms 150 kHz à 80 MHz	Sans objet	Sans objet
RF rayonnées IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz à 2,7 GHz 9 V/m à 28 V/m 385 MHz à 5785 MHz	10 V/m 80 MHz à 2,7 GHz 9 V/m à 28 V/m 385 MHz à 5785 MHz	Les forces de champ provenant d'émetteurs RF fixes, tels que déterminés par une enquête électromagnétique sur site ^a doivent être inférieures au niveau de conformité dans chaque plage de fréquence. Des interférences peuvent se produire à proximité d'un équipement affichant le symbole suivant : 
REMARQUE 1 À 800 MHz, la distance de séparation pour la plage de fréquence la plus élevée s'applique. REMARQUE 2 Ces directives peuvent ne pas s'appliquer à toutes les situations. La propagation électromagnétique est influencée par les phénomènes d'absorption et de réflexion générés par les bâtiments, les objets et les personnes.			
^a L'intensité du champ des émetteurs fixes, tels que les stations de base pour radiotéléphones (cellulaires/sans fil) et radios mobiles terrestres, radios amateurs, émissions radiophoniques AM et FM et télévisuelles ne peut pas être théoriquement anticipée avec précision. Pour déterminer l'environnement électromagnétique d'un émetteur fixe, il est conseillé d'envisager une étude du site. Si la puissance de champ mesurée sur le site d'utilisation du système de TPPN Avelle ^{MC} dépasse les niveaux de conformité applicables visés ci-dessus, le système de TPPN Avelle ^{MC} doit alors être soumis à observation pour vérifier s'il fonctionne normalement. Si des anomalies sont observées, des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires, comme réorienter ou déplacer le système de TPPN Avelle ^{MC} .			

Les équipements de communication RF portables ne devraient pas être utilisés à une distance moindre que 30 centimètres.

- Avertissements**
Ce mode d'emploi ne constitue pas une garantie. Il est conçu seulement pour servir de guide. Pour toutes questions d'ordre médical, communiquer avec un médecin. Ce produit doit être utilisé conformément à ce mode d'emploi et à l'étiquetage du produit.
- Composants requis pour assurer le fonctionnement efficace du système de TPPN Avelle^{MC}**
 - Pansement stérile du système de TPPN Avelle^{MC} (stérilisé avec de l'oxyde d'éthylène)
 - Six (6) bandes de fixation adhésives stériles (fournies avec le pansement et stérilisées avec de l'oxyde d'éthylène)
 - Pompe de TPPN Avelle^{MC} (CR4395)
 - Trois (3) piles AAA au lithium Philips™ Lithium Ultra FR03 (six piles fournies avec la pompe; trois piles sont utilisées à la fois.)
 - Sonde d'extension avec raccords Luer (fournis avec la pompe)
 - Mode d'emploi (fourni avec le pansement et la pompe)
- Définition des symboles**

Symbole	Définition	Symbole	Définition
	Numéro de lot		Limites de températures 5°C /41°F - 25°C /77°F
	Produit stérilisé à l'oxyde d'éthylène		Limites de pression atmosphérique
	Limites d'humidité		Suivre le mode d'emploi
	Non stérile		MARCHE/ARRÊT
	Numéro de série		Piles faibles
	Numéro de commande		Le dispositif fonctionne correctement.
	Fabricant (UE)		Le dispositif ne fonctionne pas correctement.
	Date de fabrication		La pompe fonctionne avec 3 piles
	Marquage CE (EU)		Garder à l'abri de la lumière du soleil
	Ne pas réutiliser		Ouvrir ici
	Garder au sec		
	EU : Ne pas jeter aux ordures générales		Consulter le mode d'emploi
	Classification de l'équipement : isolation de type BF		Ne pas stériliser de nouveau
	Sans latex		Voltage
	Signe de mise en garde		Fragile — manipuler avec précautions
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé		Date d'expiration
	Risque d'explosion		Protection des doigts contre l'accès aux composants dangereux, et protection de l'équipement contre les objets de plus de 12,5 mm Protection contre les gouttes d'eau tombant à la verticale dans les cas où l'objet est incliné jusqu'à 15 degrés de sa position normale (dans toutes directions)
	Garder cet appareil loin d'un environnement IRM		
	La législation fédérale américaine stipule que ce dispositif ne peut être vendu que par ou sur prescription d'un médecin		
	Ne pas changer		Ne pas utiliser différentes marques en même temps
	Ne pas déformer ni endommager		Ne pas utiliser des piles neuves et usagées en même temps
	Ne pas jeter au feu		Ne pas ouvrir ni désassembler
	Ne pas insérer incorrectement		Ne pas provoquer de court-circuit
		Garder hors de la portée des enfants	