



4) Dopo aver praticato il foro, asportare il foglio di carta protettiva e applicare il sacchetto esercitando una leggera pressione intorno allo stoma.

5) Per rimuovere il sacchetto, staccare delicatamente dall'alto verso il basso e contemporaneamente esercitare una leggera pressione sulla cute con la mano libera.

#### Confezioni disponibili

#### STOMADRESS® PLUS

Scatola da 30 minisacchetti post-irrigazione con barriera totale Stomahesive e nuovo filtro incorporato.

Diametro: 19/50 mm

Il presente dispositivo è esclusivamente monouso e non deve essere riutilizzato. Il riutilizzo può comportare un aumento del rischio di infezioni o di contaminazione crociata. Il riutilizzo può rendere le proprietà fisiche del dispositivo non più ottimali per l'uso previsto.



Dopo l'uso, il prodotto può rappresentare un potenziale rischio biologico. Maneggiare e smaltire il prodotto in conformità con le prassi mediche accettate e con tutte le leggi e le normative locali applicabili.

Se, durante l'uso di questo dispositivo o in conseguenza del suo utilizzo, si verificasse un inconveniente grave, segnalare la problematica al produttore e all'autorità nazionale competente.

#### SMALTIMENTO

Per lo smaltimento, attenersi alle normative locali.

Distribuito da:  
ConvaTec Inc.  
Greensboro, NC 27409

www.convatec.com  
Italia 800 930 930

 ConvaTec Limited  
First Avenue, Deeside Industrial Park  
Deeside, Flintshire, CH5 2NU, UK

 UNOMEDICAL A/S  
Aaholmvej 1-3, Osted  
4320 LEJRE DENMARK

Revised 2021-09  
1026065V1

CE

it ITALIANO

# STOMADRESS® PLUS

Minisacchetto post-irrigazione con barriera totale Stomahesive, nuovo filtro incorporato e foro centrale da allargare da 19 a 50 mm.

#### ISTRUZIONI PER L'USO



Dispositivo medico



Importatore

 ConvaTec


 ConvaTec




Stomadress Plus® è il minisacchetto post-irrigazione con barriera protettiva totale, nuovo filtro incorporato e foro centrale da allargare da 19 a 50 mm.

### Descrizione del prodotto

Stomadress Plus® è un minisacchetto ad un pezzo, realizzato appositamente per i colostomizzati che si irrigano.

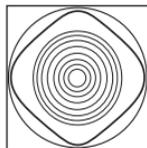

1) La barriera totale Stomahesive garantisce la massima protezione.

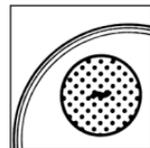

2) Il minisacchetto è dotato di un nuovo filtro incorporato che permette una più efficace deodorazione dei gas, che vengono quindi completamente eliminati.

3) Per assicurare la massima tranquillità in caso di eventuali secrezioni, la parte interna del sacchetto è costituita da uno speciale materiale superassorbente.

4) Il foro già praticato nel sacchetto può essere allargato in modo da adattarlo perfettamente alla forma e alla grandezza dello stoma.

### ISTRUZIONI PER L'USO

1) Assicurarsi che la pelle intorno allo stoma sia pulita e asciutta.

2) Misurare il diametro dello stoma.



3) Seguendo le linee già stampate sulla carta protettiva e utilizzando forbici a punta rotonda, praticare un foro con diametro superiore di circa 3 mm a quello dello stoma;

**NON TAGLIARE OLTRE L'ULTIMA LINEA (50 MM).**