

# COMBIHÉSIVE™ 2 S

## Raccord pour poches d'urostomie, adaptable à une poche de jambe ou de nuit

### Mode d'emploi



#### fr Mode d'emploi

#### INDICATIONS

À utiliser avec une urostomie.

#### UTILISATION PRÉVUE

Recueil de l'urine.

#### UTILISATEURS CIBLÉS

Professionnels de santé, soignants et personnes stomisées.


#### DESCRIPTION

Raccord de 20 cm de longueur, fait d'un tube possédant d'une part une extrémité ouverte, et d'autre part, une extrémité munie d'un système à griffes, permettant de raccorder une poche d'urostomie à une poche de jambe ou de nuit.


#### UTILISATION AVEC UNE POCHE D'UROSTOMIE MUNIE D'UN ROBINET

Pour raccorder une poche de jambe ou de nuit à une poche d'urostomie munie d'un robinet, utiliser le raccord tel que. Connecter l'embout du raccord muni du système de fixation à "griffes" sur l'extrémité du robinet de la manière suivante:


#### MISE EN PLACE DU RACCORD:

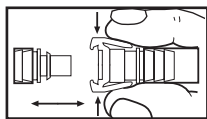


1. Appuyer sur les bras articulés des "griffes", afin de les écarter au maximum sur le pourtour de l'extrémité.

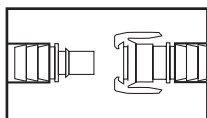

2. Pour raccorder à la poche d'urostomie, positionner le raccord à "griffes" face à l'extrémité du robinet.

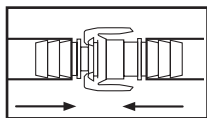

3. Emboîter les deux parties, afin que les extrémités des griffes se referment sur la partie terminale du robinet munie d'une cannelure. Faire une rotation pour positionner correctement le tube. Connecter ensuite l'autre extrémité ouverte du raccord à l'embout connecteur de la poche de jambe ou de nuit.

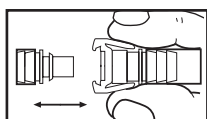

4. Pour retirer le raccord de la poche d'urostomie, presser sur les "griffes" de l'extrémité du raccord, jusqu'à ouverture du système de fixation. Tirer sur le raccord. Remplacer éventuellement par un nouveau raccord.

#### UTILISATION AVEC UNE POCHE D'UROSTOMIE MUNIE D'UN TUBE DE VIDANGE

Pour raccorder une poche de jambe ou de nuit à une poche d'urostomie munie d'un tube de vidange il est nécessaire de préparer le tube de raccord avant mise en place sur la poche d'urostomie.

#### PRÉPARATION DU RACCORD AVANT MISE EN PLACE

A l'aide d'une paire de ciseaux, couper l'extrémité du raccord afin d'éliminer la partie du système de fixation à "griffes".

Connecter ensuite l'embout du raccord sur l'extrémité du tube de vidange, de la manière suivante:

1. Positionner le raccord face à l'extrémité du tube vidange.
2. Connecter l'extrémité du raccord sur l'extrémité du tube de vidange. Exercer une traction sur le tube, afin de s'assurer que le raccord est correctement emboîté. Connecter ensuite l'autre extrémité ouverte du raccord à l'embout connecteur de la poche de jambe ou de nuit.
3. Pour retirer le raccord de la poche d'urostomie, tirer fermement sur l'embout connecté jusqu'au retrait total. Remplacer éventuellement par un nouveau raccord.

Si, lors de l'utilisation de ce dispositif ou à la suite de son utilisation, un incident grave survient, il convient de le signaler au fabricant et à l'autorité nationale compétente.

#### MÉTHODE D'ÉLIMINATION APRÈS UTILISATION

Après utilisation, ce produit peut présenter un danger biologique potentiel. Manipuler et éliminer conformément aux pratiques médicales reconnues et aux lois et règlements locaux en vigueur.

#### CODES ET RÉFÉRENCES DU PRODUIT:

Conditionnement: 10 raccords pour poches d'urostomie, adaptables à une poche de jambe ou de nuit.

Raccord 20 cm Boîte de Code  
10 2994  
Remboursé conformément au TIPS (Code 103A0322)




Ne pas réutiliser



Importateur



Dispositif médical

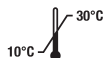

Information sur le tri des emballages - applicable à la France uniquement. Article 17 de la loi AGEC et son décret d'application n° 2021-835 du 29 juin 2021.

#### ConvaTec

ConvaTec Limited  
First Avenue, Deeside Industrial Park  
Deeside, Flintshire, CH5 2NU, UK



UNOMEDICAL A/S  
Aaholmvej 1-3, Osted  
4320 LEJRE DENMARK

France 0800 35 84 80

www.convatec.com

© 2023 ConvaTec Inc.  
®/™ est une marque déposée de ConvaTec Inc.